



L'IMMOBILIZZAZIONE DEL PAZIENTE

Croce Rossa Italiana
Comitato Locale di Urbino





OBIETTIVI

- Conoscere i presidi
- Saperli utilizzare correttamente
- Immobilizzare il rachide cervicale
- Immobilizzare la colonna in toto
- Immobilizzare segmenti osteo-articolari

Croce Rossa Italiana
Comitato Locale di Urbino





I PRESIDI



Croce Rossa Italiana
Comitato Locale di Urbino




IL COLLARE CERVICALE

Mantenere il capo
in posizione neutra

Scegliere la misura
corretta del collare

Posizionare la parte
anteriore del collare
senza stringere

Posizionare la parte
posteriore stringendo i velcri
simmetricamente

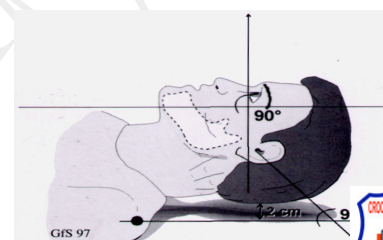

Croce Rossa Italiana
Comitato Locale di Urbino





IL COLLARE CERVICALE

Mantenere il capo
in posizione neutra

Scegliere la misura
corretta del collare

Posizionare la parte
anteriore del collare
senza stringere

Posizionare la parte
posteriore stringendo i velcri
simmetricamente



Croce Rossa Italiana
Comitato Locale di Urbino





IL COLLARE CERVICALE

Mantenere il capo
in posizione neutra

Scegliere la misura
corretta del collare

Posizionare la parte
anteriore del collare
senza stringere

Posizionare la parte
posteriore stringendo i velcri
simmetricamente



Croce Rossa Italiana
Comitato Locale di Urbino





IL COLLARE CERVICALE

Mantenere il capo
in posizione neutra

Scegliere la misura
corretta del collare

Posizionare la parte
anteriore del collare
senza stringere

Posizionare la parte
posteriore stringendo i velcri
simmetricamente



Croce Rossa Italiana
Comitato Locale di Urbino





LE STECCOBENDE

Scegliere la steccobenda

Modellare in maniera
antalgica la steccobenda

Posizionare la steccobenda

Chiudere i velcri



Croce Rossa Italiana
Comitato Locale di Urbino





LE STECCOBENDE

Scegliere la steccobenda

Modellare in maniera
antalgica la steccobenda

Posizionare la steccobenda

Chiudere i velcri



Croce Rossa Italiana
Comitato Locale di Urbino





LE STECCOBENDE

Scegliere la steccobenda

Modellare in maniera
antalgica la steccobenda

Posizionare la steccobenda

Chiudere i velcri



Croce Rossa Italiana
Comitato Locale di Urbino





LE STECCOBENDE

Scegliere la steccobenda

Modellare in maniera
antalgica la steccobenda

Posizionare la steccobenda

Chiudere i velcri



Croce Rossa Italiana
Comitato Locale di Urbino





LA BARELLA CUCCHIAIO

Misura lunghezza

Posizionare le due metà

Chiudere simmetricamente,
allacciare cinture,
posizionare sull'asse spinale



Croce Rossa Italiana
Comitato Locale di Urbino





LA BARELLA CUCCHIAIO

Misura lunghezza

Posizionare le due metà

Chiudere simmetricamente,
allacciare cinture,
posizionare sull'asse spinale



Croce Rossa Italiana
Comitato Locale di Urbino





LA BARELLA CUCCHIAIO

Misura lunghezza

Posizionare le due metà

Chiudere simmetricamente,
allacciare cinture,
posizionare sull'asse spinale



Croce Rossa Italiana
Comitato Locale di Urbino





LA TAVOLA SPINALE

Posizionare i fermacapo
e i cinghietti

Posizionare il ragno
correttamente

Allacciare i velcri
simmetricamente

Stringere i velcri



Croce Rossa Italiana
Comitato Locale di Urbino





LA TAVOLA SPINALE

Posizionare i fermacapo
e i cinghietti

Posizionare il ragno
correttamente

Allacciare i velcri
simmetricamente

Stringere i velcri



Croce Rossa Italiana
Comitato Locale di Urbino





LA TAVOLA SPINALE

Posizionare i fermacapo
e i cinghietti

Posizionare il ragno
correttamente

Allacciare i velcri
simmetricamente

Stringere i velcri



Croce Rossa Italiana
Comitato Locale di Urbino





LA TAVOLA SPINALE

Posizionare i fermacapo
e i cinghietti

Posizionare il ragno
correttamente


Allacciare i velcri
simmetricamente

Stringere i velcri



Croce Rossa Italiana
Comitato Locale di Urbino



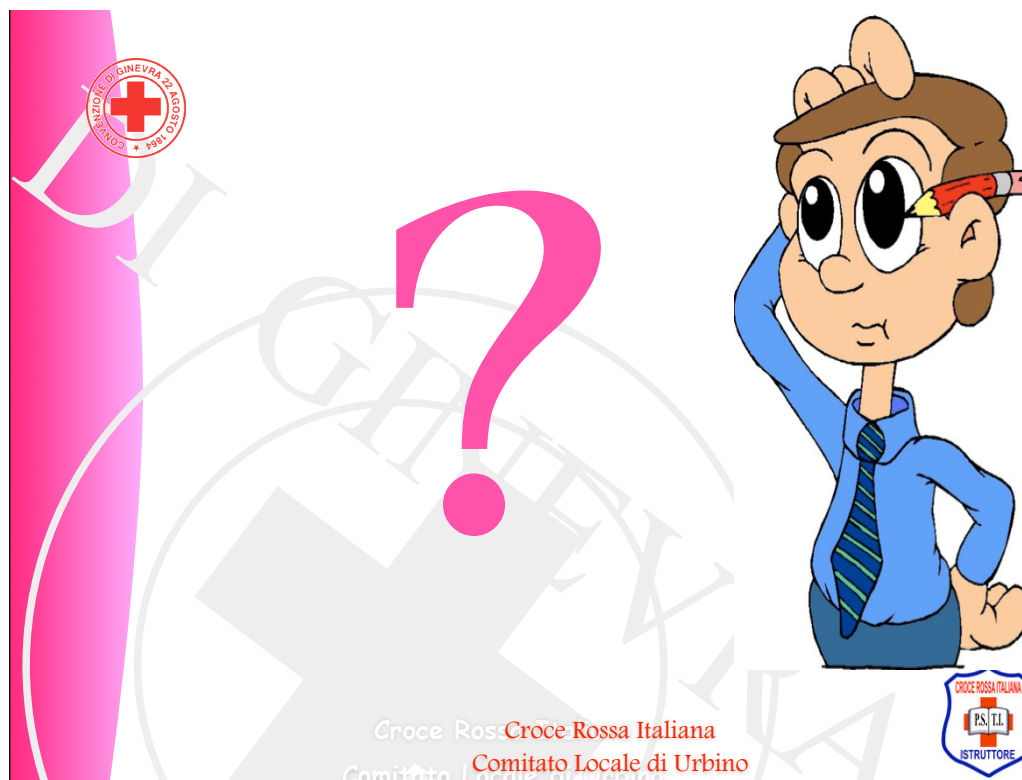



CONCLUSIONI

- È necessario conoscerli ed acquisire una buona manualità per un loro corretto utilizzo
- Richiedono un addestramento costante
- Possono essere rimossi solo a diagnostica avvenuta

Croce Rossa Italiana
Comitato Locale di Urbino

